

## Stabilité des analytes fragiles à température ambiante

Privilégier le prélèvement au laboratoire  
Utiliser obligatoirement un sachet rouge

**A PRELEVER  
IMPERATIVEMENT  
AU LABO**



- Acide lactique (*tube fluoré – gris*)
- Ammoniaque (*tube hépariné – vert*)
- Examen de sperme (*spermogramme, spermoculture*)
- Vitamine C à réaliser exclusivement au labo



- Activité anti-Xa (*tube citraté – bleu*)
- Angiotensine (*tube EDTA - violet*)
- CH50 - Complément Hémolytique total (*tube sec – rouge*)
- Homocystéine (*tube citraté - bleu*)
- VIP (*tube spécifique à demander*)
- Vitamine A, E (90 min) (*tube hépariné – vert, proscrire les tubes avec séparateur*)
- (thyro) Calcitonine (*tube sec – rouge*)
- Examen cyto bactériologique des urines - ECBU (*si flacon stérile sans acide borique*)
- Examen cyto bactériologique d'expectoration (*flacon stérile sans acide borique*)
- Recherche de cristallurie (*flacon sans acide borique*)
- TCA en surveillance de traitement à l'héparine (*tube citraté – bleu*)



- C1 inhibiteur (*tube citraté – bleu + tube sec – rouge*)



- Acides biliaires (*tube sec – rouge*)
- ACTH – corticotrophine (*tube spécifique à demander*)
- Aldostérone (*tube EDTA - violet*)
- Alcool éthylique (alcoolémie) (*tube fluoré – gris*)
- Coproculture (*flacon stérile*)
- Cross-laps CTX (à jeun avant 9h) (*tube sec – rouge*)
- Dispositif intra-vasculaire (cathéter, chambre implantable, portacath)
- Ecouvillon sans milieu de transport
- Examen cyto bactériologique d'un liquide de ponction
- Examen cyto bactériologique d'un stérilet
- Facteurs de coagulation (facteur V, ...) (*tube citraté – bleu*)
- NSE (*tube sec – rouge*)
- Protéine C (*tube citraté - bleu*)
- Protéine S (*tube citraté – bleu*)
- Recherche de formes végétatives d'Amibes dans les selles
- Rénine (*tube EDTA – violet*)

## Stabilité des analytes fragiles à température ambiante



- Résistance à la Protéine C Activée (*tube citraté – bleu*)
- Somatostatine (*tube spécifique à demander*)
- Testostérone biodisponible (*tube sec – rouge*)
- Testostérone libre (*tube sec – rouge*)
- Trisomie 21 (*tube sec – rouge*) (*consentement obligatoire*)
- Thyroglobuline (*tube sec – rouge*)
- Vitamine B1, B2, B6, PP (*tube EDTA – violet, proscrire les tubes avec séparateur*)



- Anticoagulants circulants de type lupique (*tube citraté - bleu*)
- Hémoculture (*remplir jusqu'au haut de la flèche*)
- Insuline (*tube sec – rouge*)
- Recherche d'anguillule dans les selles
- Recherche de parasites sanguicoles (filaires) (*tube EDTA – violet*)
- Recherche de sang dans les selles
- Recherche de schistosomes / bilharzies dans les urines (*flacon sans acide borique*)
- TCA sans traitement à l'héparine (*tube citraté – bleu*)



- BNP (*tube EDTA – violet*)
- CO2, bicarbonate, réserve alcaline (RA) (*tube hépariné – vert*)
- LDH (*tube hépariné – vert*)
- Magnésium (*tube hépariné – vert*)
- Peptide C (*tube sec – rouge*)
- Phosphore (*tube sec – rouge*)
- PSA libre (*tube sec – rouge*)
- Potassium (*tube hépariné – vert*)
- Procalcitonine (*tube hépariné - vert*)
- Testostérone totale (*tube sec – rouge*)
- Troponine (*tube hépariné – vert*)
- Vitesse de Sédimentation (*tube EDTA – violet*)



Autres prélèvements sanguins

Liste non exhaustive incluant les paramètres les plus fréquents.  
Pour les examens spécialisés, n'hésitez pas à prendre contact avec le laboratoire.